

Použití předplněné injekční stříkačky Sanofi pro léčbu trombózy

Zavedení injekce pro pacienty

Lékař vám předepsal nízkomolekulární heparin.

- Ten zamezuje trombóze nebo plicní embolii, případně rozpouští stávající sraženinu.
- Injekci si můžete aplikovat sami, anebo o to požádat důvěryhodnou osobu.

Jednoduchá příprava



1. Umyjte si ruce. Vyhledejte místo na pravé nebo levé straně břicha. Místo vpichu by mělo být vzdáleno alespoň 5 cm od pupku. Očistěte plánované místo vpichu alkoholovým tampónem nebo vodou a mýdlem. Pohodlně si sedněte nebo lehněte, abyste byli uvolnění. Místo vpichu byste stále měli vidět.



2. Uchopte stříkačku a sejměte ochrannou krytku.

Na špičce jehly může být zbylá kapka. Je-li tomu tak, musíte před injekcí kapku odstranit klepnutím na injekční stříkačku s jehlou směrem dolů. Nyní lze provést vstříknutí.

Vzduchovou bublinu v předplněné stříkačce neodstraňujte!



3. Na očištěném místě vytvořte pomocí palce a ukazováčku přehyb kůže, který držte až do vytažení injekční jehly.

Jednoduchá injekce



4. Zaveďte jehlu celou délkou svisle pod úhlem 90°, opatrně zatlačte píst stříkačky směrem dolů a vstříkněte celý obsah stříkačky (dbejte případně na odlišnou specifikaci dávky od svého lékaře.) Přehyb kůže nesmí povolít.

Důležité je píst stříkačky úplně zatlačit, aby se aktivoval ochranný mechanismus.



5. Po úplném vstříknutí stříkačku rovně vytáhněte. Přes jehlu se automaticky přetáhne ochranné pouzdro a uzavře ji.

Následně uvolněte přehyb kůže.



6. Použitou stříkačku odložte do nepropíchnutelné nádoby na odpad. Víko nádoby pečlivě uzavřete a nádobu na odpad uchovejte mimo dosah dětí.



Naskenujte QR kód a dohleďte si v aplikaci **Inject** další informace pro chytré zařízení (iOS, Android)!



Stáhněte si návody v 10 dalších jazycích!
www.thromboseportal.eu/injektionsanleitung

Logo Apple a App Store jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc. Logo Android a Google Play jsou obchodní známky společnosti Google LLC.